


検査手順例

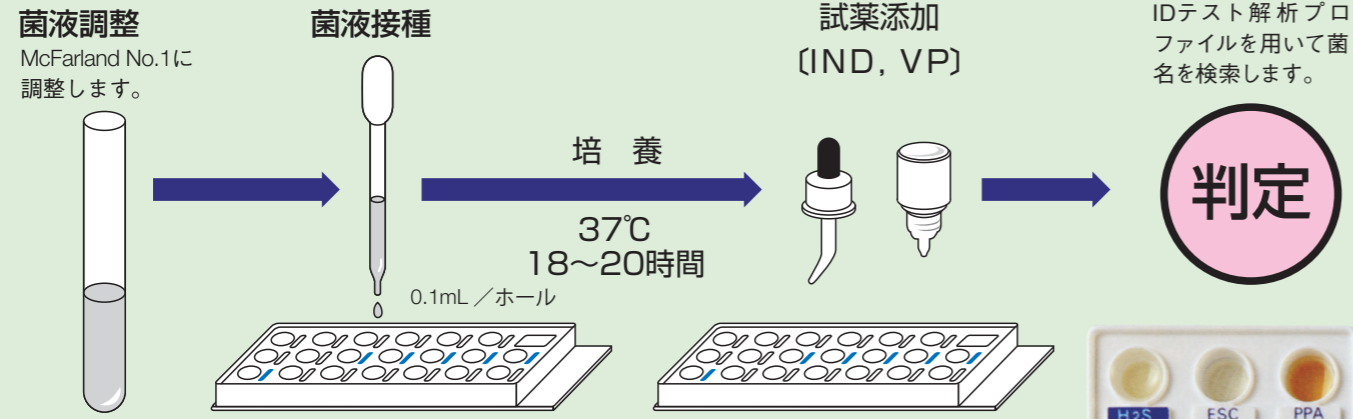

※検査手順はキットにより異なりますので、添付文書をよく読んでから使用してください。

成績表記例


**IDテスト・EB-20** 年月日 患者名  
成績表 検体名 検査者

グラム染色 **グラム陰性桿菌** ブドウ糖OF **F** オキシダーゼ **-**

H <sub>2</sub> S	ESC	PPA	IND	VP	CIT	LDC	ADH	ODC	ONPG	URE	MALO	ADO	INO	RAFF	RHA	SOR	SUC	MAN	ARA	運動性
-	-	-	+	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-	+	+	+
1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	+
0			1			5			1			0			3			3		

菌名 **Escherichia coli** 備考

追加テスト

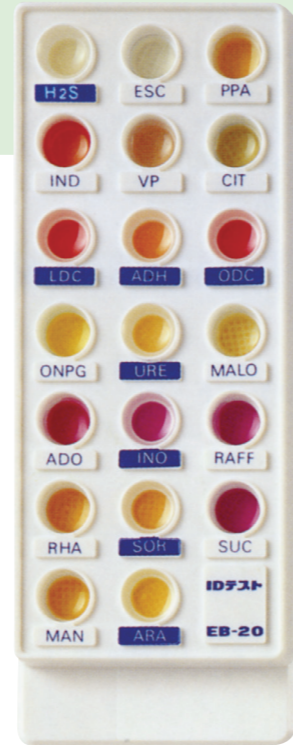

# IDテスト シリーズ

色の変化による判定でより正確な同定を

**IDテストシリーズは、微量テスト法と数値分類法に基づいて開発された簡易同定用キットです。**

- ・反応の結果が明瞭な色で判定でき、正確な同定が可能
- ・3項目ごとの配列でコード化しやすく、小型で積み重ねても安定
- ・プレートは室温保存で1年間安定

## IDテスト・EB-20

ブドウ糖発酵性グラム陰性桿菌

承認番号 16100AMZ03213000

- |                              |                           |                           |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <i>Actinobacillus</i> 属 6 菌種 | <i>Pantoea</i> 属 1 菌種     | <i>Salmonella</i> 属 11 菌種 |
| <i>Aeromonas</i> 属 3 菌種      | <i>Pasteurella</i> 属 7 菌種 | <i>Serratia</i> 属 9 菌種    |
| <i>Avibacterium</i> 属 2 菌種   | <i>Photobacterium</i> 属   | <i>Shigella</i> 属 3 菌種    |
| <i>Budvicia</i> 属 1 菌種       | <i>Plesiomonas</i> 属 1 菌種 | <i>Tatumella</i> 属 1 菌種   |
| <i>Buttiauxella</i> 属 1 菌種   | <i>Proteus</i> 属 3 菌種     | <i>Vibrio</i> 属 6 菌種      |
| <i>Cedecea</i> 属 3 菌種        | <i>Providencia</i> 属 5 菌種 | <i>Yersinia</i> 属 6 菌種    |
| <i>Citrobacter</i> 属 4 菌種    | <i>Rahnella</i> 属 1 菌種    | <i>Yokenella</i> 属 1 菌種   |
| <i>Cronobacter</i> 属 1 菌種    | <i>Raoultella</i> 属 1 菌種  |                           |
| <i>Edwardsiella</i> 属 3 菌種   |                           |                           |
| <i>Enterobacter</i> 属 7 菌種   |                           |                           |
| <i>Escherichia</i> 属 5 菌種    |                           |                           |
| <i>Ewingella</i> 属 1 菌種      |                           |                           |
| <i>Gallibacterium</i> 属 1 菌種 |                           |                           |
| <i>Grimontia</i> 属 1 菌種      |                           |                           |
| <i>Hafnia</i> 属 2 菌種         |                           |                           |
| <i>Klebsiella</i> 属 4 菌種     |                           |                           |
| <i>Kluyvera</i> 属 3 菌種       |                           |                           |
| <i>Leclercia</i> 属 1 菌種      |                           |                           |
| <i>Leminorella</i> 属 2 菌種    |                           |                           |
| <i>Moellerella</i> 属 1 菌種    |                           |                           |
| <i>Morganella</i> 属 2 菌種     |                           |                           |

(例)

**IDテスト・EB-20** 判定色調表

判定項目	H <sub>2</sub> S	ESC	PPA	IND	VP	CIT	LDC	ADH・ODC	ONPG	URE	MALO	ADO・ARA
陽性(+)	黒色	黒色 茶色	深緑色	赤色	赤色	青色	赤色	赤色	黄色	赤色 ピンク	青色	黄色
陽性限界	灰色	茶色	緑色	赤色	赤色	青色	赤色	赤色	黄色	赤色	青色	黄色
陰性(-)	無色	淡い黄緑色	無色	黄色 無色	無色	黄色	黄色	黄色	無色	橙色 黄色	黄色	紫色

※一部、菌群を含みます。

## IDテスト解析プロフィールソフトウェア(Web版)

<https://kmk-ss.net/nsi/login.php>

IDテストの生化学的性状の成績から得られたコードを解析プロフィールに入力するだけで、菌種を選択することができます!

また、使用説明、試薬添付文書、判定色調表、判定見本も確認することができます。



# IDテスト・EB-9

腸内細菌科

Citrobacter 属 2 菌種  
Hafnia 属 1 菌種  
Proteus 属 2 菌種  
Klebsiella 属 2 菌種  
Providencia 属  
Enterobacter 属 2 菌種  
Morganella 属 2 菌種  
Serratia 属 2 菌種  
Escherichia 属 2 菌種

承認番号20700AMZ00797000

(例)

判定	項目	IND	VP	CIT	MAN INO	LDC ODC	URE
陽性(+)		赤色	赤色	青色	黄色	赤色	赤色 ピンク
	陽性 限界						
陰性(-)		黄色 無色	無色	黄色	紫色	黄色	黄色 橙色

※一部、菌群を含みます。

品名	コード	包装	内容	価格	貯法・使用期限
IDテスト・EB-9	06673	50 検体用	EB-9 プレート 25 枚 × 2 EB ブイオン 50 本 滅菌流動パラフィン 20mL × 2 成績表 26 枚 × 2	14,500 円	室温 製造後 1 年間
IDテスト・EB-9 試薬	06671	100 検体用	コバック試液 6mL × 1 6% α-ナフトール試液 6mL × 1 ④40%水酸化カリウム試液 6mL × 1	4,000 円	冷所に保存 製造後 1 年間

# IDテスト・NF-18

ブドウ糖非発酵性陰性桿菌

Achromobacter 属 2 菌種  
Acinetobacter 属 4 菌種  
Alcaligenes 属  
Bergeyella 属 1 菌種  
Bordetella 属 2 菌種  
Brevundimonas 属 2 菌種  
Burkholderia 属 3 菌種  
Chryseobacterium 属 2 菌種  
Chryseomonas 属 1 菌種  
Comamonas 属 1 菌種  
Delftia 属 1 菌種  
Elizabethkingia 属 1 菌種  
Empedobacter 属 1 菌種  
Flavimonas 属 1 菌種

Methylobacterium 属 1 菌種  
Moraxella 属  
Myroides 属 1 菌種  
Neisseria 属 2 菌種  
Ochrobactrum 属 1 菌種  
Oligella 属 2 菌種  
Pseudomonas 属 7 菌種  
Psychrobacter 属 2 菌種  
Ralstonia 属 2 菌種  
Rhizobium 属 1 菌種  
Shewanella 属 1 菌種  
Sphingobacterium 属 3 菌種  
Sphingomonas 属 2 菌種  
Stenotrophomonas 属 1 菌種

Weeksella 属 1 菌種  
CDC グループ 4 菌種

承認番号20400AMZ01157000

(例)

判定	項目	GLU LAC	ESC	URE CIT	ONPG	LDC ODC	IND	NIT		GEL
							NO <sub>2</sub>	N <sub>2</sub>		
陽性(+)		黄色	黒色 茶色	赤色	黄色	赤色	赤色	茶色 赤色		黒色
	陽性 限界									
陰性(-)		赤色	淡い 黄緑色	橙色 黄色	無色	黄色	黄色 無色	無色		赤色 赤紫色

※一部、菌群を含みます。

品名	コード	包装	内容	価格	貯法・使用期限
IDテスト・NF-18	06629	25 検体用	NF プレート 25 枚 NF ブイオン 25 本 滅菌流動パラフィン 20mL × 2 成績表 13 枚 × 2	14,800 円	室温 製造後 1 年間
NF 試薬	06631	100 検体用	コバック試液 6mL × 1 亜硝酸塩検出試液 I 6mL × 1 亜硝酸塩検出試液 II 6mL × 1 亜鉛末 2.5g × 1	7,000 円	冷所に保存 製造後 1 年間

# N-IDテスト・SP-18

ブドウ球菌属

Micrococcus 属 1 菌種  
Staphylococcus 属 27 菌種

承認番号20400AMZ01072000

(例)

判定	項目	MAS FRU	PHO	VP	NIT	URE	ADH	βGL
陽性(+)		黄色	黒色 青灰色	赤色	赤色	赤色 ピンク	赤色	黄色
	陽性 限界							
陰性(-)		赤色	淡灰色 無色	無色	無色	橙色 黄色	黄色	無色

品名	コード	包装	内容	価格	貯法・使用期限
N-IDテスト・SP-18	06637	25 検体用	SP プレート 25 枚 SP ブイオン 25 本 滅菌流動パラフィン 20mL × 1 成績表 13 枚 × 2	14,800 円	室温 製造後 1 年間
SP 試薬	06638	100 検体用	6% α-ナフトール試液 6mL × 1 ④40%水酸化カリウム試液 6mL × 1 亜硝酸塩検出試液 I 6mL × 1 亜硝酸塩検出試液 II 6mL × 1	7,000 円	冷所に保存 製造後 1 年間

# IDテスト・HN-20ラピッド

ヘモフィルス属・ナイセリア属  
およびその類縁菌

Actinobacillus 属 6 菌種  
Aggregatibacter 属 2 菌種  
Avibacterium 属 4 菌種  
Bergeriella 属 1 菌種  
Bibersteinia 属 1 菌種  
Bordetella 属 1 菌種  
Capnocytophaga 属 5 菌種  
Cardiobacterium 属 1 菌種  
Eikenella 属 1 菌種  
Gallibacterium 属 1 菌種  
Gardnerella 属 1 菌種  
Haemophilus 属 7 菌種  
Histophilus 属 1 菌種  
Kingella 属 2 菌種  
Mannheimia 属 1 菌種

Moraxella 属 8 菌種  
Neisseria 属 10 菌種  
Oligella 属 2 菌種

Pasteurella 属 7 菌種  
Psychrobacter 属 1 菌種  
Suttonella 属 1 菌種

承認番号20400AMZ01146000

(例)

判定	項目	ALA	PHO	NIT		URE	ODC	IND	GLS PRO YGA	GLU XYL	O/N		βLA	
				NO <sub>2</sub>	N <sub>2</sub>						ONP	NIR	糖陽性	糖陰性
陽性(+)		黄色	青色	赤色		赤色 ピンク	赤色	赤色	黄色	黄色	黄色	ONP 陽性	ONP 陰性	黄色 橙色
	陽性 限界											黄色 (変化なし)	無色 (変化なし)	
陰性(-)		無色	灰色 無色	無色		橙色 黄色	黄色	黄色 無色	無色	赤色	無色	ピンク 赤色		赤色 赤紫色

※一部、菌群を含みます。

品名	コード	包装	内容	価格	貯法・使用期限
IDテスト・HN-20ラピッド	06635	25 検体用	HN プレート 25 枚 HN ブイオン 25 本 成績表 13 枚 × 2 β-ラクタマーゼ検出試液 3mL × 1 滅菌流動パラフィン 20mL × 1	20,000 円	室温 製造後 1 年間
HN 試薬	06640	100 検体用	コバック試液 6mL × 1 亜硝酸塩検出試液 I 6mL × 1 亜硝酸塩検出試液 II 6mL × 1 亜鉛末 2.5g × 1	7,000 円	冷所に保存 製造後 1 年間